

DEZE STOEL IS IN BRUIKLEEN

 Staopstoelzorg

085-3038239

Uitleg Fitform Handbediening

Voetenbank **'IN'**

Voetenbank **'UIT'**

Sta op hulp **'Opstaan'**
(stoel omhoog)

Kantelen: zitting en
leuning naar achteren.


En: Sta op hulp **'Gaan
zitten'** (stoel omlaag)

Rugleuning
'naar voren'

Rugleuning
'naar achteren'

Veiligheidsslot
(indien aanwezig)

Indrukken, wanneer het lampje
knippert is de bediening op slot.
Opnieuw indrukken (tot lampje
niet meer brand) en de bediening
werkt weer.

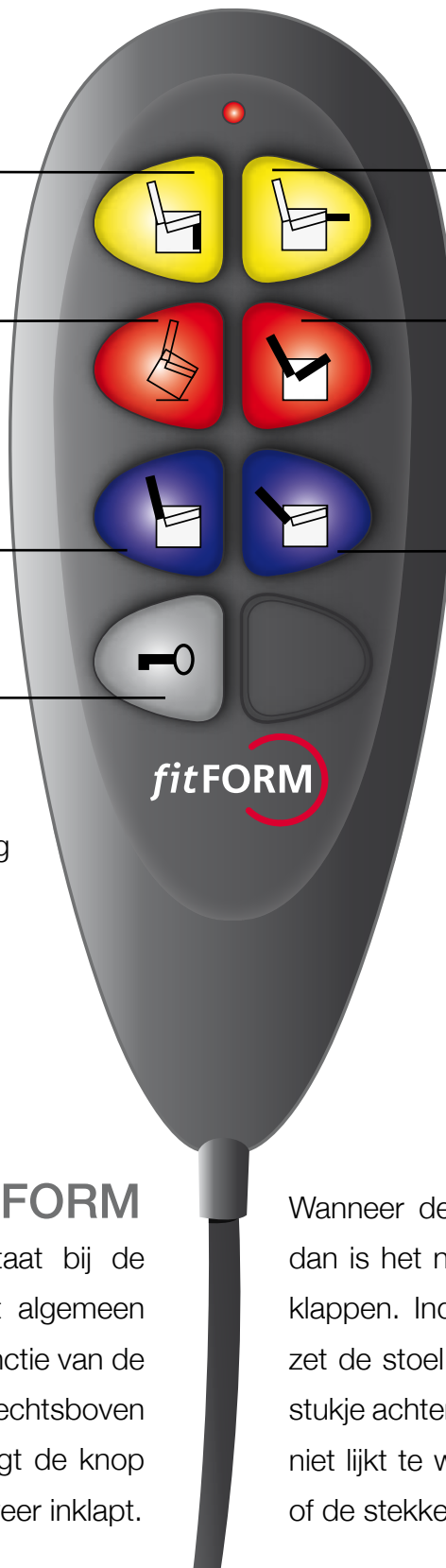

Handbediening FITFORM

De uitleg van de knoppen staat bij de afbeelding hierboven. Over het algemeen geldt: de rechterknop heeft de functie van de linkerknop op. Dus als de knop rechtsboven de voetenbank uitklapt dan zorgt de knop linksboven dat de voetenbank weer inklapt.

Wanneer de stoel in de sta-opfunctie staat, dan is het niet mogelijk de voetenbank uit te klappen. Indien de voetenbank niet uitkomt, zet de stoel dan met de rode knop een klein stukje achterover gekanteld. Wanneer de stoel niet lijkt te werken, controleer dan altijd eerst of de stekker in het stopcontact zit.



Let op, deze stoel is in bruikleen. Indien de stoel niet meer nodig is, moet deze retour naar Staopstoelzorg.
Telefoon: 085 - 30 38 239 (ook voor storingen)