

DEZE STOEL IS IN BRUIKLEEN

 **Stoopstoelzorg**

085-3038239

Beensteun 'IN'



Beensteun 'UIT'

Sta-op hulp 'Opstaan'
(stoel omhoog)



Kantelen: zitting en leuning naar achteren.

En: Sta-op hulp 'Gaan zitten' (stoel omlaag)

Rugleuning 'naar voren'



Rugleuning 'naar achteren'

fitFORM

Gebruik handbediening

De uitleg van de knoppen staat bij de afbeelding hierboven.

Gebruik beensteun

Wanneer de stoel in de sta-opfunctie staat, is het niet mogelijk de beensteun uit te laten komen. Indien de beensteun niet uitkomt, zet de stoel dan met de rode knop een klein stukje achterover gekanteld. Wanneer de stoel niet lijkt te werken, controleer dan altijd eerst of de stekker in het stopcontact zit.

Vergrendeling handbediening

Indien wenselijk, kan de handbediening geblokkeerd worden (veiligheidsslot). Het blokkeren treedt in werking door de rechter rode knop en de rechter blauwe knop gelijktijdig 8 sec. in te drukken. Er klinkt 1x een piepsignaal.

Om de handbediening weer te activeren (de blokkering wordt uitgeschakeld) dienen de rechter rode knop en de rechter blauwe knop nogmaals gelijktijdig 8 sec. ingedrukt te worden.

Nu klinkt 2x een piepsignaal en de stoel kan weer worden versteld middels de handbediening.

Let op, deze stoel is in bruikleen. Indien de stoel niet meer nodig is, moet deze retour naar Stoopstoelzorg. Telefoon: 085 - 30 38 239 (ook voor storingen)

